

PHAGO'SPRAY DM

Sprej za dezinfekciju na bazi alkohola

Upotreba

- Sredstvo za profesionalnu dezinfekciju i čišćenje površina.
- Može da se prska na sve površine otporne na alkohol.

Karakteristike

- Dezinfekciono sredstvo širokog spektra. Ima baktericidno, virucidno i fungicidno dejstvo.
- Registrovan za upis u VAH-listu.

Upustvo za upotrebu

- Phago'spray DM je spreman za upotrebu. Naprskajte na krpu za jednokratnu upotrebu ili nanesite direktno na površinu. Nemojte ispirati.
- Vreme delovanja: 15 minuta

Sastav

Aktivne supstance:

- Etanol (CAS 64-17-5): 24 % v/v
- Didecildimetilamonijumhlorid (CAS 7171-51-5): 0,14 % v/v
- Alkilamin (CAS 2372-82-9): 0,25 % v/v

Fizičko – hemijske osobine

- Izgled: Bistra tečnost
- Boja: Bezbojna
- Miris: na grejpfrut
- Gustina (20 °C): 0,968 g/ml
- pH-vrednost (100 %): 9,5 - 11

Bezbednost i transport

Pažnja UN 1993

Skladištenje

Koristiti na temperaturama iznad 5°C. Skladištiti na temperaturi iznad 0°C. Rok trajanja: 3 godine

Pakovanje: kante 5l

Efikasnost

Standard	Koncentracija	Vreme
BAKTERICIDNO DEJSTVO		
EN 1040 (<i>P. aeruginosa</i> and <i>S. aureus</i>)	0,5%	1min
EN 1276 čisti uslovi (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. Aeruginosa</i> i <i>S. aureus</i>)	80%	15min
EN 13697 čisti uslovi (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> and <i>S. aureus</i>)	100%	5min
EN 13697 prljavi uslovi (<i>S. typhimurium</i>)	10%	5min
EN 13727 prljavi uslovi (<i>E. hirae</i> , <i>S. aureus</i> i <i>P. aeruginosa</i>)	50%	5min
FUNGICIDNO DEJSTVO		
EN 1275 (<i>C. albicans</i>)	2,5%	15min
EN 13697 čisti uslovi (<i>C. albicans</i>)	100%	15min
EN 13624 čisti uslovi (<i>C. albicans</i>)	25%	5min
MIKOBaktericidno dejstvo		
EN 14348 čisti uslovi (<i>M. avium</i>)	50%	15min
VIRUCIDNO DEJSTVO		
EN 14476 (Rotavi rus)	90%	5min
HIV1	100%	1min
HBV	0,25%	10min
EN 14476 (Influenza A/H1N1)	80%	30s

Bezbedno koristite biocide.

Pre upotrebe pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.